

# INSTRUCTIE MET AFBEELDINGEN

Lees vóór het begin van het onderzoek de volledige Pregnabit Pro gebruiksaanwijzing (in boekvorm), die in de oorspronkelijke set zit.

CE 0197

[www.pregnabit.com](http://www.pregnabit.com)

Pregnabit<sup>®</sup> Pro  
CTG telemedicine system



**1** Pregnabit Pro – zet het apparaat aan: druk ongeveer 2-3 seconden op de knop links op het apparaat.



**2** Om een onderzoek met de Pregnabit Pro uit te voeren, log je in met de gebruikersaccount die je op het telemedisch platform hebt aangemaakt of met de pincode die je door je zorgverlener is verstrekt.



**3** De transducer op het apparaat aansluiten. De transducers moeten verbonden worden via de speciale poorten op de bovenkant van het apparaat.



**4** Het aanbrengen van gel op de FHR transducer. Bedek de hele binnenkant van de transducer met echogel.



**5** De plaatsing van de FHR transducer. Beweeg de transducer over de buik, zoek het duidelijkste geluid van de hartslag van de baby en plaats de FHR transducer op dit punt. Zet de transducer met een buikband vast.



**6** De plaatsing van de TOCO transducer. De transducer moet op de bovenbuik geplaatst worden en met een buikband vastgemaakt worden.



**7** Plaatsen en starten van de pulse oximeter. Klem de clip op je vinger (wijsvinger van de linkerhand aanbevolen) en zet hem aan door op de ON/OFF knop te drukken.



**8** Voordat je met het onderzoek begint, vul je de vragenlijst in die op het scherm van het apparaat verschijnt.



**9** Start het onderzoek. De duurtijd van het onderzoek is ongeveer 30 minuten.



**10** Foetale bewegingen tijdens het onderzoek moeten worden aangegeven door op de knop aan de rechterzijde van het apparaat te drukken of op de knop op het beeldscherm met het voetsymbool. Deze moet ingedrukt worden telkens als foetale beweging gevoeld wordt.



**11** Volg de instructies die tijdens het onderzoek op het scherm verschijnen.



**12** De testgegevens worden voortdurend naar het telemedisch platform gestuurd, maar bij slechte dekking van het mobiele netwerk kan het zenden ook na afloop van het onderzoek doorgaan.



**13** Nadat de gegevensoverdracht voltooid is, maak je de transducers los en maak je ze schoon met ontsmettingsdoekjes.

# ALGEMENE INFORMATIE

Lees vóór het begin van het onderzoek de volledige Pregnabit Pro gebruiksaanwijzing (in boekvorm), die in de oorspronkelijke set zit.

[www.pregnabit.com](http://www.pregnabit.com)

**Pregnabit<sup>®</sup> Pro**  
CTG telemedicine system

Pregnabit Pro is een telediagnostisch medisch hulpmiddel dat het werk van dokters en verloskundigen ondersteunt. Het is beschikbaar voor medische deskundigen die tele-CTG-onderzoeken uitvoeren of Pregnabit Pro aan patiënten uitlenen, en ook voor patiënten die thuis CTG-onderzoeken willen doen.

Met de Pregnabit Pro kunnen patiënten in het derde trimester van de zwangerschap overal en altijd een tele-CTG-onderzoek ondergaan zonder naar een arts te hoeven gaan.

De Pregnabit Pro kan de foetale hartslag, de samentrekkingsactiviteit van de baarmoeder en de hartslag van de moeder meten. De CTG-opname wordt voortdurend uit het apparaat gezonden voor interpretatie door gekwalificeerd medisch personeel.

- Tijdens het onderzoek moet je een opgeladen telefoon bij je hebben, waarvan het nummer als contact op het telemedisch platform is ingevoerd. De telefoon moet binnen handbereik zijn, want hiermee kan de zorgverlener (indien noodzakelijk) contact opnemen met de patiënte.
- Houd alle onderdelen van de Pregnabit Pro set binnen handbereik. Hiervoor is het nuttig het apparaat, de set transducers, pulseoximeter en gel voor CTG uit de koffer te halen.
- Correct onderzoek vereist passende motorische activiteit van het kind. Als het kind niet erg actief is vóór het onderzoek, is het raadzaam een lichte maaltijd te eten. Het is raadzaam vóór het onderzoek naar het toilet te gaan.
- Het onderzoek duurt 30 minuten en kan automatisch tot 59 minuten verlengd worden.

## ONDERDELEN VAN DE PREGNABIT PRO SET

- PREGNABIT PRO
- FHR EN TOCO transducers
- PULSE OXIMETER
- OPLADER
- BUIKBANDEN VOOR TRANSDUCERS (2 stuks)
- echoGEL
- ONTSMETTINGSDOEKJES
- GEBRUIKSAANWIJZING

